



# アンチラストEX

スチールバー滅菌酸化皮膜(錆)防止剤

新発売



器具表面の  
錆や金属焼け  
(黒色変化)を防止

金属腐蝕防止剤配合

NET. 1L

## 商品説明

- 蒸気やヒーター熱から発生する酸化皮膜を防止します。
- 器具表面の金属焼け(黒色変化)を防止しますので器具の寿命が長くなります。
- 安全性が高く排水も環境に配慮した優れた防錆剤です。(PRTR法非該当品)

## 使用方法

**施術中または直後** ゴム手袋、保護メガネなど必要な防護策を施して下さい。

スチールバー、インプラントドリルにご使用します。

- ①器具を洗浄処理。
- ②ガーゼに滅菌物を包みます。
- ③JPアンチラストEX原液に10分間浸漬しガーゼを軽く絞ります。
- ④オートクレーブで、滅菌物の一番上に置き滅菌処理します。



**【使用上の注意】**●使用時はゴム手袋、保護メガネを着用すること。●本剤と他の薬剤、洗浄剤と混合しないこと。●万一飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませ、無理に吐かないで速やかに医師の診断を受けること。**【廃棄上の注意】**液を廃液する場合、大量の水とともに流すこと。

# JP アンチラストEX

スチールバー滅菌酸化皮膜(錆)防止剤

# 1L

商品名 : JPアンチラストEX  
用途 : 金属の滅菌・錆の防止  
液性 : アルカリ性  
成分 : 金属腐蝕防止剤、精製水、その他  
内容量 : 1L

