ァ クレーブウォッシュ∈X

滅菌器洗浄剤

新発売



缶体内のしつこい汚れに 優れた溶解・ 分解力&消臭

混合酸性剤 / 界面活性剤 / 着色剤配合



故障の原因となるカルキ成分や不純物の汚れを除去、滅菌器の日々のメンテナンスにご使用いただけます。悪臭の原因となる腐敗タンパクなどの配管内の汚れを効果的に除去致します。

洗浄前







※熱線銅パイプは銅の表面が酸化被膜に変化する為、腐食の進行は生じません。

使用方法

- 1 滅菌器の電源をONにして下さい。200cc(計量カップ2杯分※)の本品を管体(滅菌槽)に入れて下さい。
- 2 オートクレーブの場合は、そのまま134°Cの滅菌コースを選択頂きスタートボタンを押して滅菌コースを開始してください。
 - ※定量の水を入れる場合は、その分量から200ccを引いた分量を管体(滅菌槽)に入れて下さい。
- 3 滅菌コース終了後、通常の水のみの使用で1回運転して内部の汚れを排出させて下さい。
 - ●洗浄は1か月に1度を目安に使用下さい。 ●滅菌物は入れずに滅菌コースを運転してください。

※汚れがひどい場合1度では綺麗にできないことが有るのでご注意下さい。 ※キャップ1杯:100cc

【使用上の注意】 ●本品の使用目的以外には使用しないでください。 ●使用時はゴム手袋、保護メガネを着用すること。 ●本剤と他の薬剤、洗浄剤と混合しないこと。 【応急処置】 ●万一目に入った場合は、直ちに流水で洗い流しその後速やかに眼科医の診断を受けること。 ●万一飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませ無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受けること。 ●液が皮膚についた場合は、直ちに水で洗い流し異常があれば医師の診断を受けること。

プレーブウォッシュ*EX*

滅菌器洗浄剤

商品名 : JPクレーブウオッシュEX用 途 : オートクレーブ用消臭洗浄剤

液性 :酸性

成 分 : 混合酸性剤、界面活性剤、着色剤、精製水

内容量 : 1L

GS1-128

物流用





