

製品案内

パイプクリーンEX

石膏トラップ・スピットン・バキューム・排唾管洗浄液

新発売



非塩素系、石膏トラップ等の

腐敗臭を 根こそぎ除菌 消臭

IPMP 配合 / 除菌剤配合 / 防カビ剤配合

NET.

4L

さわやかなミントの香り

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

商品説明

- 排水パイプや、石膏トラップなどの水垢、印象材、血液、歯垢染色剤、などの付着物を剥離し、雑菌の増殖を抑えます。
- 塩素系成分は不使用でゴム・プラスチックの膨潤劣化及び金属の腐食を防ぎます。
- 洗浄、消臭、メンテナンスが同時にできます。
- さわやかなミントの香り。

使用方法

1. 石膏トラップ除菌・脱臭の場合

原液200mL を作業終了後直接排水管に流しトラップに流入させてください。

2. スピットン・排水パイプの場合

診療終了後、スピットン・排水パイプに、10 倍希釈液300mL を流入し、翌朝水で洗い流してください。

3. バキューム・排唾管の場合

診療終了後、バキューム・排唾管に、10 倍希釈液300mL を吸引し、翌朝水で洗い流してください。

4. バキュームチップ・プラスチック・ゴム製品の場合

10 倍希釈液に30 分間以上浸した後、水洗いしてください。

5. 洗濯機槽内のカビ洗浄の場合

原液200mL を槽内に入れ、自動洗浄してください。(リネン類は入れないでください)

【使用上の注意】●使用時はゴム手袋、保護メガネを使用すること。●万一目に入った場合は、直ちに流水で洗い流し、その後速やかに眼科医の診断を受けること。●万一飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませて速やかに医師の診断を受けること。●液が皮膚に付いた場合は、直ちに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けること。●本剤と他の薬剤、洗浄剤とは混合しないこと。●本剤の説明書に記載の用途以外には使用しないこと。●本剤使用後は、密閉し直射日光を避けて保管すること。

パイプクリーンEX

石膏トラップ・スピットン・バキューム・排唾管洗浄液

4L

商品名	: JPパイプクリーンEX
用途	: 使用済み設備機器の洗浄・除菌・消臭
液性	: アルカリ性
成分	: IPMP、防菌・防カビ剤、非イオン界面活性剤、キレート剤、着色剤、香料、精製水
内容量	: 4L

GS1-128

物流用



(01)04595317848095



ミツワJPセントラル

ウェブサイト
QRコード▶



株式会社ミツワJPセントラル 千葉県柏市東1丁目2番45-801