

スーパークリーンEX
器具・小器具用酵素系防錆洗浄剤

新発売



使用済み器具の

タンパク質(血液)を
強力分解

除菌剤配合 / タンパク質分解酵素配合 / 防錆剤配合

NET.

4L

eco

100倍希釈
(超音波洗浄の場合)

商品説明

● インジケータータイプの洗浄液

液交換のタイミングを変色でお知らせします

使用前




液交換時期



● 界面活性剤、タンパク分解酵素剤

タンパク質(血液)を強力分解します

たまごの白身

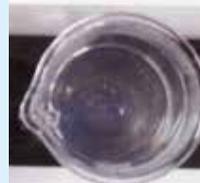

● 防錆剤配合 大切な器具を変色から守ります



使用方法

● 浸漬の場合

☑ 30倍希釈(汚れが酷い場合2倍希釈)

🕒 15分~30分以上の浸漬を目安でご使用下さい。

● 超音波洗浄機で使用の場合

☑ 100倍希釈(汚れが酷い場合10倍希釈)

🕒 10分~15分を目安でご使用下さい。

1次洗浄の重要性



ミツワJPセントラル滅菌セミナー

<https://www.youtube.com/watch?v=PuaajKaHnBw>

QRコードを読み込んで

ご覧ください▶



【使用上の注意】●インスツルメント等の長時間(1時間以上)の浸漬は、錆たり黒く変色することがあるのでご注意ください。また、添付文書に洗浄に関する注意事項がある場合は添付文書の指示に従うこと。●超音波洗浄機をご使用の場合は、汚れの度合いを見て1週間を目安に交換し、洗浄槽の清掃を行ってください。●使用時はゴム手袋、保護メガネを着用すること。●本剤と他の薬剤、洗浄剤と混合しないこと。●本剤の記載の用途以外には、使用しないこと。●本剤使用後は、密閉して直射日光を避けて保管すること。【応急処置】●万一目に入った場合は、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。、異常があれば、眼科医の診断を受けること。●万一飲み込んだ場合は、口をすすぐこと。無理にはかせないこと。ばく露又はばく露の懸念がある場合は、医師の診断を受ける事。●液が皮膚についた場合は、直ちに水で洗い流し、異常があれば医師の診断を受けること。【廃棄上の注意】●関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄すること。

スーパークリーンEX

器具・小器具用酵素系防錆洗浄剤

4L

商品名 : JPスーパークリーンEX
用途 : 使用済み器具の洗浄
液性 : アルカリ性
使用量の目安 : 100倍希釈(超音波洗浄の場合)
成分 : 非イオン界面活性剤、タンパク分解酵素剤、防錆剤、除菌剤、精製水
対象 : 鉄、ステンレス、プラスチック、ゴム、シリコン

GS1-128

物流用



(01)04595317848088



ミツワJPセントラル

ウェブサイト
QRコード▶



株式会社ミツワJPセントラル 千葉県柏市東1丁目2番45-801