

スーパートレークリーンEX

トレ印象材剥離洗浄剤

はがす
タイプ

溶かさず縮めて、
楽にはがす!!



経済的

- ① 使用濃度は
3倍希釈のECOタイプ

衛生的

- ① 浸漬液が濁らず衛生的
- ② 防菌・防錆剤入り
で衛生管理に適合

効率的

- ① 印象材がべとつかず
トレ清掃がかんたん

コスト 低減

- ① トレー自体への
負荷・負担を軽減し長持ち
- ② 剥離効果が低減しても
連続使用が可能

手肌に優しく
トレ清掃が
短時間で終了

原液
NET. **2L**
eco 使用濃度 **3倍希釈**

商品説明

使用したトレーを清掃する洗浄剤。トレー清掃がラクラク、かんたんにはがして除去。
手肌に優しく無理な力をかけずに済むためトレーが長持ち。



使用方法

施術中または直後 ゴム手袋、保護メガネなど必要な防護策を施して下さい。

- 1 石膏模型を撤去し、そのままトレーを浸漬し放置します。 **前処理なし**
- 2 浸漬時間は休憩時間など2時間程で終了します。 **短時間**
- 3 剥離効果が低減しても1/3注ぎ足しで長期使用が可能になります。 **コスト低減**

※ ペースト状トクヤマAP1 ミキサーの印象材の場合には濃い目の2倍希釈でご使用下さい。

スーパートレークリーンEX
印象材撤去動画



QRコード

【使用上の注意】●使用時はゴム手袋、保護メガネを着用すること。●本剤と他の薬剤、洗浄剤と混合しないこと。●本剤の記載の用途以外には、使用しないこと。●本剤使用後は、密閉して直射日光を避けて保管すること。**【応急処置】**●万一目に入った場合は、直ちに流水で洗い流し、その後速やかに眼科医の診断を受けること。●万一飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲ませ、無理に吐かせないで速やかに医師の診断を受けること。●液が皮膚についた場合は、直ちに水で洗い流し、異常があれば医師の診断を受けること。**【廃棄上の注意】**●液を廃液する場合、大量の水とともに流すこと。

スーパートレークリーンEX
トレー印象材**剥離**洗浄剤

2L

商品名 : JPスーパートレークリーンEX
用途 : 使用済みトレーの洗浄
内容量 : 2L



ミツワJPセントラル

ウェブサイト
QRコード ▶



株式会社ミツワJPセントラル 千葉県柏市東1丁目2番45-801